



## gigasept® powerTRIO

### Der neue Standard in der Wischaufbereitung

Patientensicherheit steht immer an erster Stelle. Das schließt natürlich auch die fachgerechte Aufbereitung von Medizinprodukten ein, die am oder im Körper von Patient:innen angewendet werden. Als Spezialist in Sachen Desinfektion bieten wir Ihnen eine sichere Lösung für die Wischaufbereitung.

#### Eine intelligente Lösung.

Unter Zeitnot ist Sorgfalt eine Herausforderung. Hier setzen wir an: Mit dem gigasept® powerTRIO bekommen Sie eine Lösung an die Hand, auf die Sie sich verlassen können. Die Tücher sind komplett vorbereitet, griffbereit und im Karton sinnvoll von links nach rechts angeordnet. Die beiden Dosen sind fest mit dem Karton verbunden, was Verwechslungen verhindert. Das zugehörige Dokumentationsbuch ist stets griffbereit. So müssen nur noch die Handgriffe ausgeführt werden, die unbedingt notwendig sind. Das spart Zeit und vermeidet Fehler.

#### Das Plus an Sicherheit.

Mit dem gigasept® powerTRIO setzen Sie auf Sicherheit. Für Patient:innen stellen Sie ein sauberes und desinfiziertes Medizinprodukt innerhalb kurzer Zeit sicher; Anwender:innen profitieren von dem einfachen Handling und der lückenlosen Dokumentation des Aufbereitungsprozesses. Alle Komponenten sind ready-to-use und somit sofort einsatzbereit. Zusätzlich schützt ein antimikrobieller Lack auf dem Karton vor Kreuzkontaminationen.



- 1 gigasept® powerTRIO cleaning wipe**  
zur Reinigung des Medizinproduktes
- 2 gigasept® powerTRIO disinfection wipe**  
zur viruziden Abschlussdesinfektion des Medizinproduktes
- 3 gigasept® powerTRIO rinsing wipe**  
zur Nachreinigung möglicher Desinfektionsmittelrückstände auf dem Medizinprodukt


### gigasept® powerTRIO – für die Aufbereitung von Medizinprodukten ohne Lumen



Transvaginale  
Ultraschallsonden  
(TVUS)



Transösophageale  
Ultraschallsonden  
(TEE)

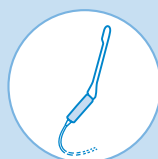

Transrektale  
Ultraschallsonden  
(TRUS)



Stablin-  
endoskope



Laryngoskope

und viele weitere Medizin-  
produkte ohne Lumen

## Diese Vorteile bietet Ihnen das gigasept® powerTRIO:

- ✓ Vollumfängliche Lösung inkl. Reinigung, Desinfektion, Nachreinigung und Dokumentation
- ✓ 100% ready-to-use – keine Vorbereitung oder Aktivierung notwendig
- ✓ Umfassende Wirksamkeit (bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid gegen *C. difficile*) innerhalb von 5 Minuten
- ✓ Mikrobiologische Testung nach neuesten Standards und EN-Normen
- ✓ Breite Materialkompatibilität für den Einsatz auf unterschiedlichen Materialien
- ✓ Großes Tuchformat (20x20cm) und hochwertige Vliesstoffqualität für eine optimale Abreinigung und Benetzung
- ✓ Anwenderfreundliche Handhabung durch funktionale, flexible und platzsparende Verpackung
- ✓ Antimikrobielle Beschichtung des Kartons zum Schutz vor Kreuzkontaminationen
- ✓ Validierbare Reinigung und Desinfektion

## gigasept® powerTRIO

## So können Sie das gigasept® powerTRIO bestellen:

Karton mit 5x gigasept® powerTRIO  
für je 30 Aufbereitungen

**Artikelnummer:** 70003176  
**PZN:** 17858810



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Sie möchten sich ausführlich zum  
gigasept® powerTRIO beraten lassen?  
**Schreiben Sie uns oder rufen Sie einfach an:**

✉ [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com) ☎ +49 40 52100-666

Sie möchten sofort mehr erfahren?  
Weitere Informationen und ein  
Anwendungsvideo finden Sie hier:

[www.schuelke.com/gigaseptpowertrio](http://www.schuelke.com/gigaseptpowertrio)